


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BD AUTOSHIELD™ DUO (5mm y 8mm)

Facilidad de utilización

Las agujas más seguras del mercado son las agujas de doble sistema seguridad, que ofrecen protección en ambos extremos y son compatibles con todas las plumas para el tratamiento de la diabetes. La amplia superficie de las agujas DUO 8mm y 5mm de BD reduce la presión que se ejerce sobre la piel y la aguja queda oculta a la vista, aumentando la comodidad de uso y reduciendo el riesgo de inyección intramuscular. La aguja no es visible, minimizando así el rechazo por parte del paciente. Igualmente como comprobación de la activación del sistema de seguridad BD introduce en sus agujas Duo una banda roja en el protector (ver imagen)

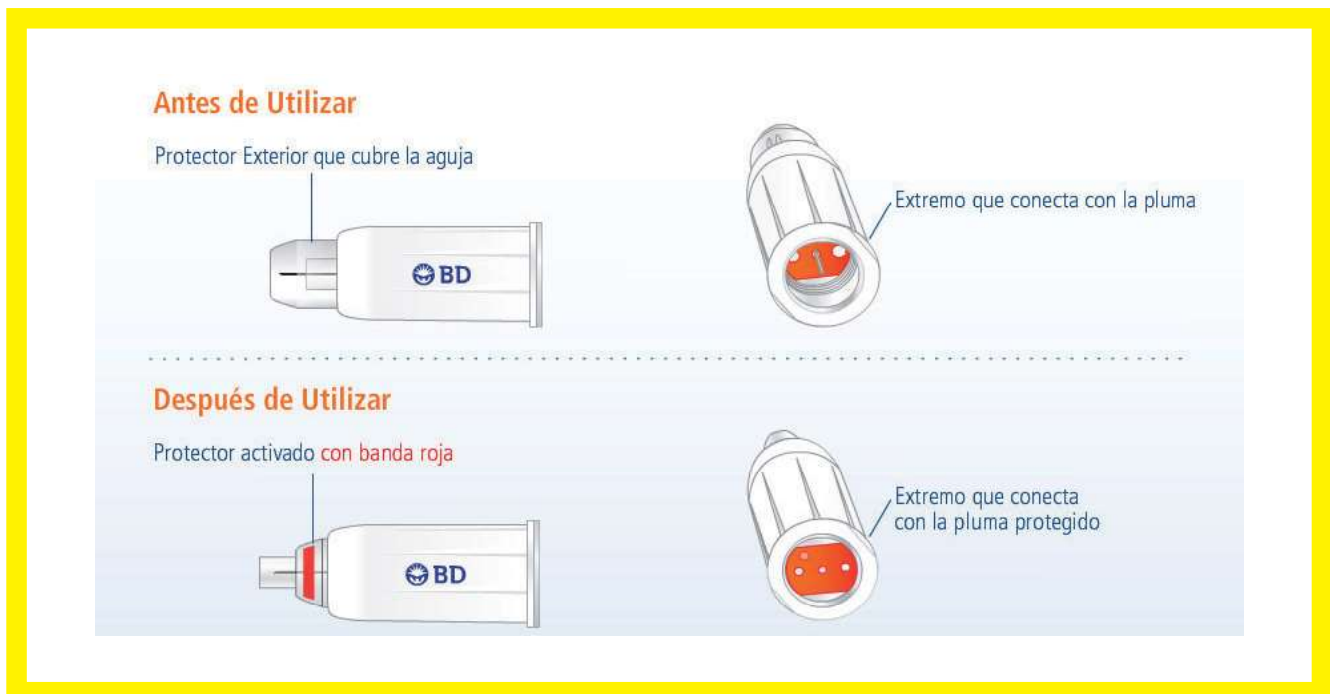

Calidad

La compatibilidad de las agujas para pluma BDTM con los inyectores de pluma para el tratamiento de la diabetes se ha probado según el protocolo de ISO 11608-2:2012 relativo a los Sistemas de Inyección por Aguja para Uso Médico.

Las pruebas de compatibilidad garantizan que se comprueba con regularidad:

- La colocación y extracción de las agujas para pluma BD en los inyectores de pluma (ya que el diseño de enroscado del conector puede variar)
- El funcionamiento del inyector de pluma con las agujas para pluma BDTM (precisión de dosis)



Rendimiento / eficacia

La confirmación de compatibilidad garantiza:

- La tranquilidad de los pacientes y los profesionales sanitarios
- Una logística optimizada, ya que las agujas para pluma BD se ajustan a todas las plumas para el tratamiento de la diabetes que se detallan en el envase del producto

Las agujas para pluma BD™ son compatibles con⁽¹⁾:

Sanofi	ClickSTAR, SoloSTAR, TactiPen, OptiClick, OptiPen Pro 1, OptiPen Pro 2, OptiSet
Lilly	KwikPen, Byetta Pen, HumaPen Memoir/Luxura/Luxura HD/Ergo II, Humalog Pen, Humulin Pen, Humuline Pen
Novo Nordisk	FlexTouch, Vistoza Pen, FlexPen, NovoPen 3/4/Junior/Echo, InnoLet
Berlin-Chemie	Berlipen Areo
B.Braun	Omnican Pen
Ypsomed	Ypsopen, Dongbao Pen, Biomatik Pen
Owen Mumford	Autopen 24/Classic/Junior, Biosulin Pen
Pfizer	Genotropin Pen

También son compatibles con: Forsteo y Humatropen 3 (Lilly)

Las agujas de seguridad para pluma de BD, son fáciles de manejar como si de una aguja convencional se tratara, teniendo como valor añadido su doble protección que evita pinchazos accidentales:

1. Antes de la inyección



1. Coloca la aguja en la pluma



2. Purga la pluma



3. Sujeta la pluma con la palma de la mano, manteniendo el pulgar elevado.

Aparte de la ergonomía y manejabilidad, este sistema de seguridad de BD añade otras ventajas

2. Técnica de inyección

Técnica sin pellizco
Técnica preferida de inyección segura para 5 mm*

Inyección con ángulo de 90° sin pellizco.

Angulo incorrecto.

Técnica con pellizco
Técnica alternativa por si hubiera posibilidad de inyección intramuscular donde no hay superficie dura (ej. zona blanda) donde inyectar.

Pellizco amplio e inyección con ángulo de 90°.

Angulo incorrecto.
El pellizco no es lo suficientemente amplio.

*Si consideras que puede existir riesgo de inyección intramuscular, pellizca una zona de piel más amplia.

La aguja penetra por completo cuando el protector blanco entra en contacto directo con la piel.
Mantén la aguja dentro de la piel durante 10 segundos después de haber presionado completamente el botón de inyección.

3. Doble protección automática

Una banda indicadora roja y un clic confirman que los mecanismos de seguridad se han activado. Al extraerse de la piel, la aguja queda bloqueada por el extremo que ha estado en contacto con el paciente.

En el extremo que conecta la aguja a la pluma, la protección se activa al retirarse la pluma. Entonces se despliega un protector naranja que cubre la aguja.

4. Desecha la aguja de forma regular

La aguja queda protegida por ambos extremos.

Desecha la aguja utilizada en un contenedor para objetos punzantes.

adicionales:

1. Evita toda posibilidad de que la aguja sea reutilizada, asegurando un pinchazo con máxima lubricación y confort.
2. Contribuye a prevenir lipodistrofia, ya que no es posible reutilizar la aguja.
3. Mecanismo de seguridad que se activa automáticamente sin riesgo para el profesional sanitario u otros de su entorno durante el desechado.

BD AutoShield™ Duo. Para su tranquilidad

BD AutoShield™ Duo es la primera aguja para plumas de insulina con seguridad disponible en 5mm y 8 mm, con doble sistema de protección.



Antes de la inyección la aguja está protegida



Durante la inyección el escudo está retraído



Después de la inyección la aguja está protegida

BD AutoShield™ Duo Referencias:
Caja de 100 unidades, Referencia: 329605
Caja de 100 unidades, Referencia: 329608



CERTIFICACIÓN CE

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL ORGANISMO NOTIFICADO:

Las agujas de insulina BD Autosheild™ Duo (5mm y 8mm) están certificadas por:
National Standards Authority of Ireland (NSAI)

1 Swift Square
Northwood, Santry
Dublín 9
Irlanda

Número del organismo notificado: 0050

CLASIFICACIÓN DE DISPOSITIVO MÉDICO:

Las jeringas de insulina BD™ son dispositivos médicos de Clase IIa según se define en la Directiva 93/42/CEE, relativa a Productos Sanitarios.

NÚMERO DE CERTIFICADO CE:

252.140

